

## ANTIBIOTHÉRAPIE À DOMICILE VIA POMPE CADD MÉROPÉNEM AUX 8 HEURES

Patient : \_\_\_\_\_ DDN : \_\_\_\_\_

**MÉDICAMENT ET POSOLOGIE** : Méropénem 1000mg IV q 8 h

**DURÉE** : 24 heures/sac préparé

**NOMBRE DE DOSES** : 3 doses/sac

**RECONSTITUTION :**

Fioles : Méropénem fioles de 500mg et 1000mg

Volume diluant : 10 mL eau stérile pour injection par fiole de 500mg

20 mL eau stérile pour injection par fiole de 1000mg

Concentration obtenue : 50 mg/mL

**PRÉPARATION :**

Soluté : NaCl 0.9%

	<b>Dose aux 8 heures (mg)</b>	<b>Dose quotidienne totale (mg)</b>	<b>Volume de médicament à ajouter (mL)</b>	<b>Format du soluté (mL)</b>	<b>Surplus estimé (mL)</b>	<b>Concentration finale (mg/mL)</b>
<input type="checkbox"/>	1000	3000	60	250	15	9.2
<input type="checkbox"/>	2000	6000	120	500	30	9.2

\*\*\* NE PAS OUBLIER DE RETIRER L'AIR DU SAC \*\*\*

**STABILITÉ :**

Température pièce : 17 heures\*

Réfrigérateur : 4 jours

\* La première dose doit donc démarrer immédiatement après l'installation du sac sur le patient.

## PROGRAMMATION :

	<b>Dose aux 8 heures (mg)</b>	<b>Volume résiduel (mL)</b>	<b>Volume par dose (mL)</b>	<b>Durée de dose (h)</b>	<b>Intervalle de dose (h)</b>	<b>Débit TVO (mL/h)</b>
<input type="checkbox"/>	1000	325	103	1	8	0.5
<input type="checkbox"/>	2000	650	211	1	8	0.5

- 1) Pour débiter la programmation de la pompe CADD Solis VIP, appuyer sur le bouton d'alimentation sur le côté de l'appareil.
- 2) Appuyer sur la touche «Tâches».
- 3) Faire défiler le menu des tâches jusqu'à voir l'option «Voir les tâches avancées», sélectionner en appuyant sur la touche «Sélect».
- 4) Faire défiler le menu des tâches avancées et sélectionner l'option «Lancer prot. nouveau patient», puis appuyer sur «Continuer».
- 5) Entrer le code 6-1-1, puis appuyer sur «Valider».
- 6) Sélectionner le traitement «Intermittent», puis sélectionner «Antibio Standard» en appuyant sur «Sélect».
- 7) Appuyer sur la touche «Sélect» pour confirmer.
- 8) Valider les informations à l'écran, puis appuyer sur la touche «Oui» pour confirmer.
- 9) L'écran revoir paramètre pompe apparait, sélectionner «Revoir».
- 10) Appuyer sur la touche «Sélect» pour modifier chacun des paramètres, soit volume de dose, durée de dose, cycle de dose (intervalle), dose suivante, débit MVO (TVO) et volume résiduel (le débit de dose est calculée automatiquement par la pompe), puis appuyez sur «Enreg» pour enregistrer les modifications.
- 11) Appuyer sur «Valider» pour chacun des paramètres lorsqu'ils sont adéquats, puis appuyer sur «Suivant».
- 12) Fixer ensuite la cassette de la tubulure, puis appuyer sur «Oui» pour purger la tubulure.
- 13) Déconnecter la tubulure du patient le cas échéant, ouvrir les clamps, puis appuyez sur «Purger».
- 14) Une fois la purge terminée, appuyer sur «Arrêter la purge».
- 15) Appuyez sur «Non» si la purge est bel et bien complétée.
- 16) Appuyer sur «Oui» pour démarrer la pompe lorsque la tubulure est branchée au patient.

## RÉFÉRENCES :

- 1- Giudice M, Grégoire N et Massicotte A. Manuel de pharmacothérapie parentérale 40e édition, Hôpital d'Ottawa 2019.
- 2- Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs 18<sup>e</sup> édition, ASHP 2015.

Rédigé par Marc-André Lupien, pharmacien 040347, département de pharmacie CISSS-AT, Hôpital de Val-d'Or, décembre 2021.